

ANLEITUNG REINIGUNG

MINI-VAKUUMREINIGER VAC-CLEAN UV®

Die Reinigung gliedert sich in 4 Abschnitte:

1. Regelmäßige Reinigung nach Gebrauch

Nach Benutzung des Mini-Vakuumreiniger **vac-clean uv**® sammelt sich im transparenten Basis-Aufsatz sowie den verwendeten Aufsatz-Düsen (Bürste, Tube oder RIC) der angesaugte Schmutz und das Cerumen. Die Cerumen-Rückstände sind größer und schwerer als Staub und lagern sich bereits an der Innenwandung der Aufsatz-Düsen (Bürste, Tube oder RIC) und auch in dem transparenten Basis-Aufsatz ab.

Nach jeder Hörsystem-Säuberung sollten die Aufsatz-Düsen zusammen mit dem Basis-Aufsatz mit einer leichten Dreh-Zug-Bewegung vom Gerät abgetrennt und in einem Ultraschallbad z.B. **u-sonic 2** gereinigt werden.

Danach Wasserreste gut abspritzen und abtrocknen. Dabei kann auch die elektronische Trockenhaube z.B. **dry-cap uv 3**® verwendet werden.

2. Reinigung nach Bedarf

Die Oberfläche des Mini-Vakuumreiniger **vac-clean uv**® sollte nach Ansicht und Bedarf öfters mit Reinigungs-Feuchttüchern abgewischt werden. Dabei ist auch der Vorratsraum unter dem Basis-Aufsatz mit dem Feuchttuch abzuwischen.

Im Vorratsraum befindet sich die Ansaugöffnung mit einem Schaumstoff-Filter. Mit der Bürsten-Aufsatz-Düse sollten Verschmutzungen auf dem Schaumstoff-Filter leicht abgebürstet werden. Dabei den Filter mit dem Fingernagel etwas fixieren.

ACHTUNG: Der Schaumstoff-Filter muss stets wieder eingesetzt werden. Er schützt Ihr Gerät.

3. Schaumstoff-Filter-Wechsel

Der Wechsel des Schaumstoff-Filters empfiehlt sich nach längerer Benutzung der **vac-clean uv**® mindestens 4x pro Jahr. Bei sichtbar starker Verschmutzung des Schaumstoff-Filters kann dieser mit einer Pinzette, einem spitzen Gegenstand oder auch mit der Bürsten-Aufsatz-Düse aus der Ansaugöffnung heraus gehobelt werden.

Im mitgelieferten Zubehör befindet sich ein Chiffon-Beutel mit 20 Stück Ersatz-Filtern.

Der neue Schaumstoff-Filter ist in die Ansaugöffnung einzusetzen und der transparente Basis-Aufsatz mit einer Drehbewegung wieder aufzustecken.

ACHTUNG: Der Schaumstoff-Filter muss stets wieder eingesetzt werden. Er schützt Ihr Gerät.

TIPP: Die verschmutzten Schaumstoff-Filter aufbewahren. Sie können im verschlossenen Chiffon-Beutel in einem Ultraschallbad z.B. **u-sonic 2** leicht gereinigt und so wiederverwendet werden.

Bei filigranen Filterwechsel hilft der Service des Hörakustikers. Beachten Sie auch die Gebrauchsanweisung der **vac-clean uv**®.

4. Ersatzteil-Set

Falls einzelne Teile nach längerem Gebrauch verschleissen oder verloren gehen, bieten wir die Möglichkeit, über ein optionales Ersatzteil-Set diese zu ersetzen. Das Ersatzteil-Set enthält: 5 Stk. Beutel schwarz mit je 20 Stk. Schaumstofffiltern, 1 Stk. Basis-Aufsatz transparent, 2 Stk. Bürsten-Aufsatz-Düse, 2 Stk. Tube-Aufsatz-Düse und 2 Stk. RIC Aufsatz-Düse.